

TOBIN®

Lavado de ojos



REF MEDOP 900355

CE 0413

STERILE

2



1



2

- Interrumpir el lavado para parpadear y mover los ojos.
- Los períodos de lavado son válidos sólo cuando LA MAYOR PARTE del líquido llega al ojo. Lavar bajo los párpados.
- Controlar el flujo cubriendo el agujero del fondo con el pulgar.

Contenido: 1 litro de solución salina estéril al 0.9%. Botella desechable, de un solo uso. Se vacía en unos 3 min., a la presión natural. Conservar entre 2-35°C. Las botellas expuestas a radiaciones ultravioletas tienen una duración antes de la venta menor de 3 años. NO utilice líquido turbio. Reponga inmediatamente las botellas usadas. Fabricado por: Tobin Scandinavia AB - Suecia. ☒ = fecha caducidad



3

Comience a lavarse el ojo inmediatamente. Los daños aumentan por segundos

Alcalinos

10-20 min.

Seguir lavando mientras se va al médico

Ácidos

5 min.

Acudir al médico

Tiempo de lavado Agentes desengrasantes y polvo/suciedad.
1-3 min.

**MEDOP**Bruno Mauricio Zabala 16,
49003 Bilbao

Tel: 34 + 944 790 280

Fax: 34 + 944 169 081

Atención al Cliente: 902 151 269

info@medop.es

www.medop.es

TUBES-04-02

⌚ 2007-11 [LOT] 04-082