




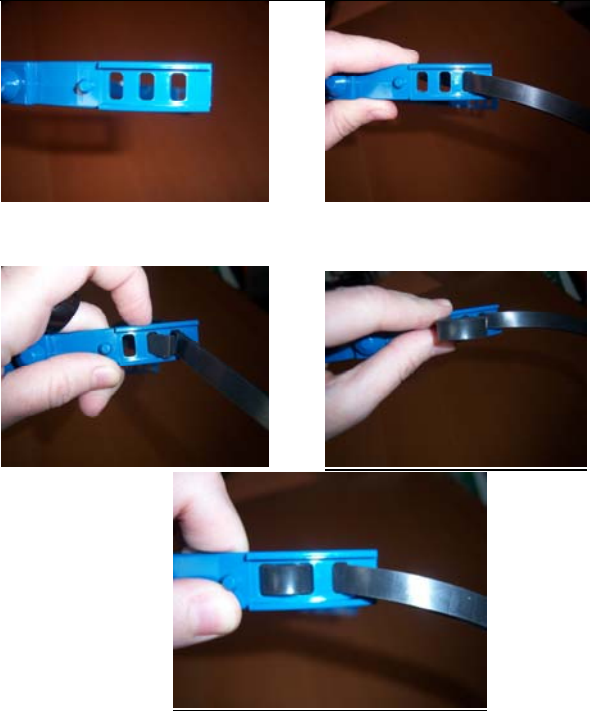
INFORME DE CALIDAD

MONTAJE : ADAPTADOR UNIVERSAL

16/12/09

ESPECIFICACIONES MONTAJE :ADAPTADOR UNIVERSAL

PASOS A SEGUIR

	<p><u>Componentes adaptador universal.</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Parte frontal, de color azul.2. Parte posterior, goma elástica de caucho.
	<p><u>Montaje Pasos a Seguir.</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Se visualizan los 3 agujeros laterales, parte lateral de la zona frontal del adaptador.2. Se introduce la goma elástica por el agujero mas externo, de manera que la goma sea introducida de fuera hacia adentro.3. Se introduce por el segundo agujero, esta vez , de dentro hacia fuera.4. Se introduce por el tercer agujero, de fuera hacia dentro.5. Se estira del extremo libre de la goma elástica de caucho, para asegurarnos el correcto montaje y evitar la aparición de zonas desajustadas.
	<p>Se repite la operación en el otro extremo agujereado del adaptador. Hasta conseguir el montaje final.</p>



INFORME DE CALIDAD

MONTAJE : ADAPTADOR UNIVERSAL

16/12/09



MONTAJE FINAL



Visión de la parte lateral del adaptador una vez montada la goma elástica .**PARTE INTERIOR DEL ADAPTADOR.**

Nota : la parte elástica saliente debe de tener una longitud de 1.3 cm.



Visión de la parte lateral del adaptador una vez montada la goma elástica .**PARTE EXTERIOR DEL ADAPTADOR.**